



センサーパネル


高感度センサーが、
赤ちゃんの体動を
いつでもモニタリング。



病院でも実績のある信頼性の高い
高感度センサーによって、
赤ちゃんの体動を常にモニタリング
することができます。

異常時は
光とアラームで
お知らせ。

センサーが赤ちゃんの体動に
異常を感じると、本体から
警告灯とアラーム音を発して
周囲にお知らせします。

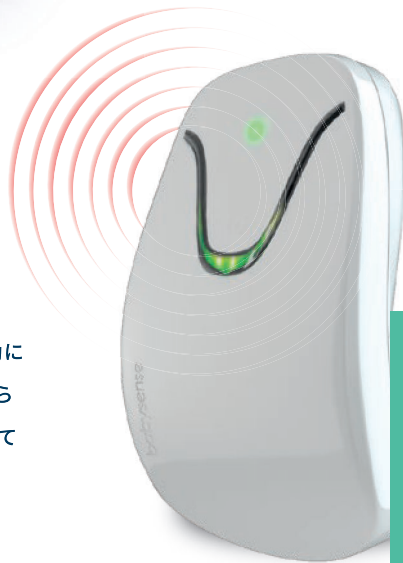

コントロールユニット(本体)

ドクターも認めた安心品質。

小児の専門病院での勤務経験があった私でさえ、初めての自分の赤ちゃんに対しては不安がいっぱいでしたが、ベビーセンス™は非常に使いやすくシンプルにデザインされており、スイッチ操作もとても簡単で誰でも問題なく使えると思いました。使い始めてからはとにかく安心感が違いました。特に夜の睡眠中の安心感はとても心強く、なにかもかが手探りの子育ての状況の中、本当に助けられたと実感しています。医療従事者として一人でも多くの赤ちゃんを見守る皆様には是非ベビーセンス™を使って頂きたいと思いました。またあなたの赤ちゃんが元気に大きくなるように祈っています。

大阪大学医学部付属病院 麻酔科 弓場 智雄 先生

babysense™ home



販売名 ベビーセンスホーム R1
一般的名称 体動センサ JMDM 70074000
医療機器クラス分類 クラスⅠ 一般医療機器
医療機器届出番号 13B3X1022001004

babysense™

販売元

ベビーセンスジャパン合同会社
www.babysense.jp

102-0074
東京都千代田区九段南4-7-22-601
TEL : 03-6261-6699
eMail : info@babysense.jp

本 社

ハイセンスリミテッド
HISENSE.Ltd.
国名:イスラエル

製造販売元

サージテック株式会社
東京都千代田区九段南3-4-15
TEL : 03-3511-3330



当社オンラインショップでお使い頂ける
10%OFFクーポンコードは BSHOME99

実際の使用方法は添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。

いつでもそばで、
みまもる安心。
大切な笑顔のために。



安心の品質。

病院やクリニックでも
使っています！

babysense™
home
ベビーセンス [ホーム]



高感度センサーが常に赤ちゃんの体動を感知。
異常時は警告灯とアラームで知らせてくれる。



Peace of mind.

目を離している間でも、
いち早く異常を知らせてくれる
「安心」という存在。

赤ちゃんが「もしも」のとき、
すぐに気づいてあげられることで
救える命があります。

赤ちゃんが安全に過ごす上では、
さまざまな不安や心配がつきものです。
とくにベッドやお布団で寝ているときは、
思いがけない事故に見舞われる割合も
高くなるのがわかっています。
「ベビーセンス™ ホーム」は、
ママとパパが忙しい毎日の中でも、
いつでも赤ちゃんを見守り、
異常時はすぐに知らせてくれる、
信頼できる「安心」をお届けします。


babysense™
home



HOW TO 使い方

設置はかんたん。
使うときは電源をオンするだけ。
非接触で赤ちゃんにやさしい。

ベビーセンス™ホームは、分かりやすい設置方法とシンプルな操作で
だれでもかんたんに始められるように設計されています。
赤ちゃんの肌に直接触れない非接触式の高感度センサーで、
体動を確実にモニタリングしながらやさしく安全を見守ります。

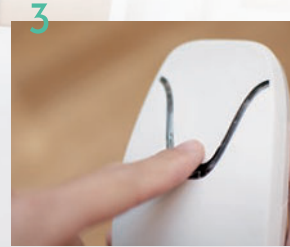

かんたんなステップで、
すぐに始められる。

機器を接続し、設置が完了すれば
あとはスイッチをオンするだけ。
シンプルな操作ですぐに始めら
れます。

センサーパネルはマットレスの下に設置。
非接触で赤ちゃんにも安心。

異常時は
光とアラームでお知らせ。

体動が20秒間停止する、または1分間
に10回未満になった場合に、警告灯と
アラームでお知らせします。

電源ON表示
緑色ランプ

警告
赤色ランプ

低電圧
警告ランプ

電源ボタン

運動表示
緑色ランプ